



屋内用スロープ 段ない・スR


取扱説明書 保証書

このたびは、「屋内用スロープ 段ない・スR」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本書には、この製品の使い方と使用上の注意事項について記載しています。
使用者および介助者の方は、ご使用前によくお読みの上、正しくお使いください。
また、お読みになったあとは、お使いになられる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

用途

屋内の段差を解消し、安全な歩行をサポートする屋内用スロープです。

仕様

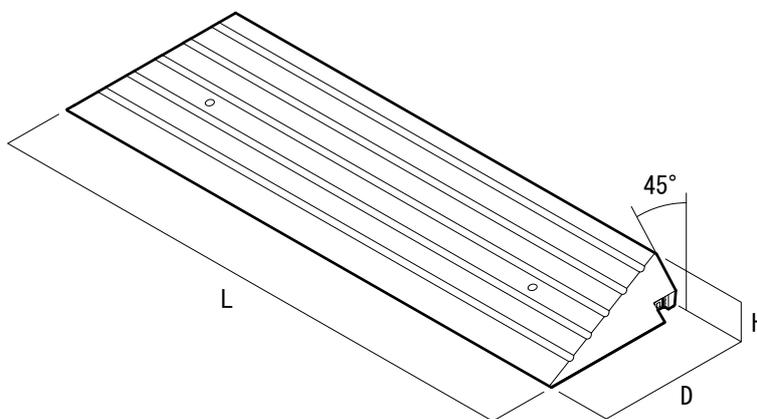

品名	品番コード	TAISコード	L	H	D	重量	適応段差
屋内用スロープ 段ない・スR 31	629-130	01235-000299	90cm	3.1cm	12.3cm	約1.4kg	3.1~3.5cm
屋内用スロープ 段ない・スR 36	629-140	01235-000300		3.6cm	14.5cm	約1.8kg	3.6~4.0cm
屋内用スロープ 段ない・スR 41	629-150	01235-000301		4.1cm	16.7cm	約2.4kg	4.1~4.5cm
屋内用スロープ 段ない・スR 46	629-160	01235-000302		4.6cm	18.8cm	約2.8kg	4.6~5.0cm
屋内用スロープ 段ない・スR ショート 31	629-135	01235-000303	80cm	3.1cm	12.3cm	約1.2kg	3.1~3.5cm
屋内用スロープ 段ない・スR ショート 36	629-145	01235-000304		3.6cm	14.5cm	約1.6kg	3.6~4.0cm
屋内用スロープ 段ない・スR ショート 41	629-155	01235-000305		4.1cm	16.7cm	約2.1kg	4.1~4.5cm
屋内用スロープ 段ない・スR ショート 46	629-165	01235-000306		4.6cm	18.8cm	約2.5kg	4.6~5.0cm

※最大耐荷重 120kg

特徴

高さ調整機能により、基準高さ+0.4cmの範囲で段階的に調整することができます。
傾斜部分に滑り止め塗装を施しています。

使用上のご注意

ここでは、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたい注意事項を記載しています。ご使用前に必ず読んでいただき、理解した上でご使用いただきますようお願い申し上げます。

 警告	この表示の内容を無視して誤った使い方をすると死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示の内容を無視して誤った使い方をすると傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される内容を示しています。



警告

- ・本製品は屋内用の段差解消スロープです。その他の用途には使用しないでください。
- ・衝撃荷重はかけないようにご注意ください。
- ・弊社製品と他社製品を組み合わせ使用しないでください。
- ・改造や加工をしないでください。
- ・ねじで床固定する場合は、お買い上げの販売店または専門業者に依頼してください。取付方法を誤りますと使用中に事故を引き起こす場合があります、大変危険です。



注意

- ・濡れた状態で使用しないでください。
- ・介助者が必要な方が使用する場合は十分ご注意ください。

設置・保管上のご注意



警告


- ・平らで水平な場所に設置してください。
- ・設置後、ガタつき、ねじのゆるみ、締め忘れがないことを必ず確認してください。
- ・定期的に点検を行い、ガタつき、ねじのゆるみ、締め忘れや破損、その他異常がないか確認してください。



注意

- ・直射日光の当たらない、乾燥した常温の室内で設置・保管してください。
高温多湿の場所で設置・保管しますと、変形や破損など製品異常の原因となります。
- ・接地面の材質や色、長期使用によって滑り止めゴムの色が変わる場合がありますのでご注意ください。

各部の名称・材質

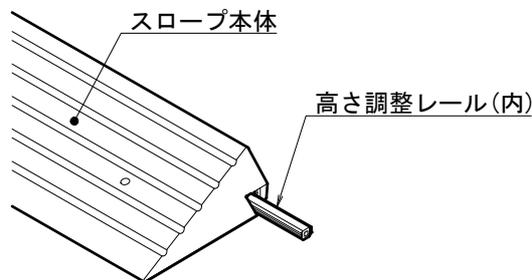


付 属 品		
		
抜け止め	抜け止めねじ	床固定用ねじ
		
	化粧シール1	

内 訳		
部 材 の 名 称	材 質	入 数
スロープ本体	天然木 (ウレタン樹脂特殊塗装)	1台
高さ調整レール(内)	アルミ	1本
付 属 品	材 質	入 数
抜け止め	アルミ	2枚
抜け止めねじ (十字穴付きトラスパッドねじ3.5x10)	ステンレス	2本
床固定用ねじ (十字穴付きなべパッドねじ3x20)	スチール (ユニクロ)	2本
化粧シール1	アートタック紙	2枚


設置手順

1. 段差に高さを合わせる

スロープ本体と段差の高さを合わせ、高さ調整レール(内)を差し込んでください。

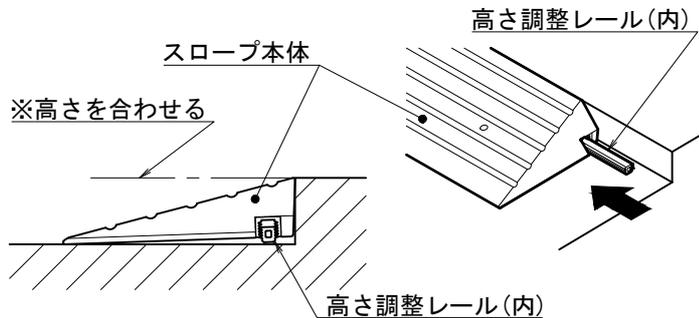


⚠ 注意

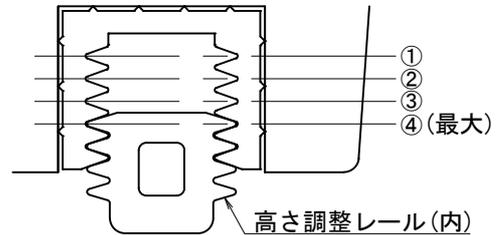

高さ調整範囲は、①～④の4段階となります。


2. 抜け止めの取り付け

高さ調整レール(内)の両端に、抜け止めねじ(十字穴付きトラスパッド®ねじ3.5x10)で、抜け止めを取り付けてください。(2ヶ所)

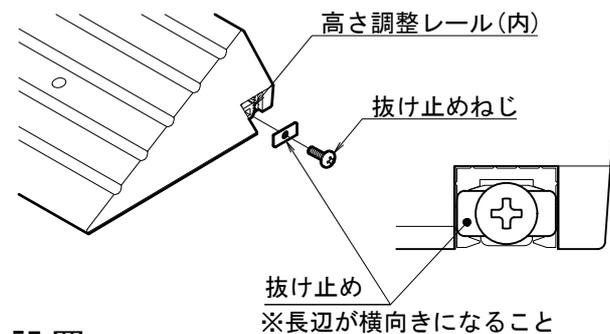

3. 滑り止めゴムの剥離紙をはがす


裏面の滑り止めゴムの剥離紙をはがしてください。(6ヶ所)

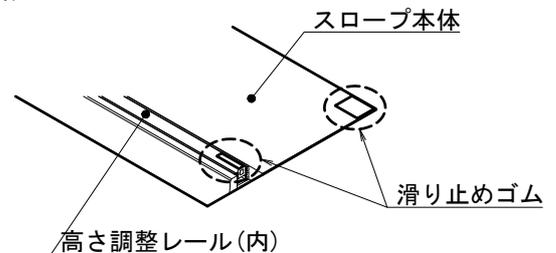

4. 設置

滑り止めゴムとの接地面のホコリ等を取り除き、上から押さえてください。(上から押さえるとズレにくくなります。)

※床に固定する場合は、床固定用ねじ(十字穴付きなべパッド®ねじ3x20)でスロープ本体を床に固定してください。(2カ所)

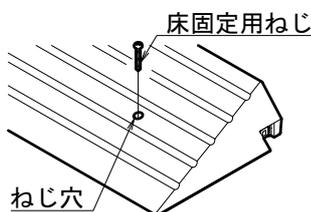


⚠ 注意

床に固定する場合は、お買い上げの販売店または専門業者に依頼してください。

5. 化粧シールの貼り付け

スロープ本体のねじ穴に、化粧シール1を貼り付けてください。

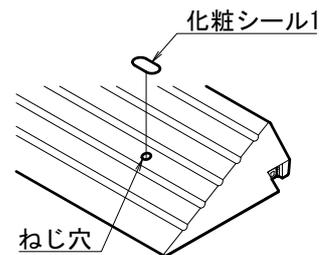

お手入れ方法

■ 日常のお手入れ

水またはぬるま湯に浸した布をよく絞ってお手入れしてください。

汚れがある場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き取ったあと水拭きし、最後に乾拭きしてください。

⚠ 注意

下記のものは、お手入れに使用しないでください。
・酸性洗剤、塩素系洗剤、アルカリ性洗剤
・シンナー、油類などの有機溶剤
・クレンザー、磨き粉など、粗い粒子を含んだ洗剤
・研磨剤入りのスポンジ、たわし、ブラシ

保証書

この製品の保証期間は、お買い上げの日より1年間です。
お客様が取扱説明書等の注意書きに従った使用状態で、保証期間内に破損や故障をした場合に本保証書記載内容により無料修理いたします。

- 下記に該当する場合は、保証期間内でも有料修理となります。
 - 使用上の誤りや不注意、改造、修理などによる故障又は損傷。
(本来の用途以外で使用した場合、耐質量を超えた使用や設置ミス等の誤使用)
 - 弊社が示す説明書に基づいた組立て、施工、維持管理を行わなかった場合の故障または損傷。
 - 時間の経過や部品の消耗などによる不具合。
 - 火災、地震、落雷、風水害、塩害、ガス害、異常電圧など天災地変による故障または損傷。
 - お買い上げ後の移動や落下などによる故障または損傷。
 - その他、製造者の責任でない原因や製造者以外の故意・過失によると判断される故障または損傷。
 - 本保証書のご提示がない場合。
 - 本保証書のお買い上げ日、販売店の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

〈個人情報の取扱いについて〉

- 保証書にご記入いただいた住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動やその後の安全点検活動のために利用いたします。
本書にてお預かりするお客様の個人情報をお客様の同意を得ることなく、第三者に提供または開示いたしません。
- 修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を委託する場合、当社と同等の水準でお客様の個人情報を取り扱うように管理いたします。

お買い上げ日	年 月 日	お客様
保証期間	1年間	ご住所 〒
品名		
販売店		ご芳名 TEL

上表に記入のない場合は有効となりますので、必ず記入の有無をご確認下さい。もし記入のない場合はお買い上げの販売店にお申し出ください。

修理・取扱などのご相談は、まずお買い上げの販売店にお申し付けください。

※商品の改良のため、仕様や外観、価格は予告なく変更する場合があります。

055-5031



本社工場

〒769-2402 香川県さぬき市津田町鶴羽1118-15
TEL (0879) 42-1111(代) FAX (0879) 42-1112

<https://www.sk-shikoku.co.jp>